

*ACCU-CHEK® Guide Me*



# INSTRUÇÕES DE USO

MONITOR DE GLICEMIA



## Índice

Introdução .....	2
Capítulo 1: O seu novo sistema .....	5
Capítulo 2: Testes de glicemia .....	10
Capítulo 3: Testes de controle .....	17
Capítulo 4: Revisão dos seus dados .....	21
Capítulo 5: Comunicação sem fio, emparelhamento do monitor e transferência de dados.....	24
Capítulo 6: Manutenção do monitor e solução de problemas.....	27
Capítulo 7: Informações técnicas .....	35
Capítulo 8: Garantia .....	41
Índice remissivo.....	42

# Introdução

---

Estas instruções de uso contêm advertências, precauções e notas:

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	 <b>PRECAUÇÃO</b>	<b>NOTA</b>
Uma <b>ADVERTÊNCIA</b> indica um risco previsível de alta gravidade.	Uma <b>PRECAUÇÃO</b> descreve uma medida que você deve tomar para usar o produto de forma segura e eficaz ou para evitar danos ao produto.	Uma <b>NOTA</b> chama sua atenção para informações importantes que o ajudam a tirar o máximo proveito do uso do produto.

## O sistema Accu-Chek Guide Me

O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me e as tiras-teste Accu-Chek Guide destinam-se à medição quantitativa da glicose em sangue total capilar fresco obtido do dedo, da palma da mão, do antebraço e do braço, sendo um recurso auxiliar para monitorar a eficácia do controle da glicemia.

O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me e as tiras-teste Accu-Chek Guide destinam-se à automonitorização diagnóstica in vitro realizada por pessoas com diabetes.

O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me e as tiras-teste Accu-Chek Guide destinam-se ao teste laboratorial remoto de diagnóstico in vitro realizado por profissionais de saúde em ambiente clínico. A realização de testes em sangue venoso, arterial ou de neonatos é restrita a profissionais de saúde.

O sistema não é adequado para diagnosticar o diabetes mellitus nem para testar amostras de sangue do cordão umbilical de neonatos.

Próprio para a automonitorização

O sistema inclui:

monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me com baterias, tiras-teste Accu-Chek Guide\* e soluções de controle Accu-Chek Guide\*.

\* Alguns itens podem não estar incluídos no kit. Esses itens são vendidos separadamente.

### ADVERTÊNCIA



#### **Risco de asfixia**

Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas. Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças e de pessoas que possam engolir as peças pequenas.

#### **Risco de lesões fatais**

- Mantenha baterias novas e usadas fora do alcance de crianças. A ingestão ou introdução em qualquer parte do corpo pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves em até 2 horas após a deglutição. Se você acha que uma bateria pode ter sido engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento das baterias não puder ser firmemente fechado, pare de usar o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

### ADVERTÊNCIA

#### **Risco de infecção**

Qualquer objeto que entre em contato com o sangue humano é uma possível fonte de infecção (veja: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, May 2014). Profissionais de saúde: ver também a seção Informações para profissionais de saúde no capítulo Informações técnicas.

#### **Risco de sério dano à saúde**

Se as instruções de teste ou as instruções de armazenamento e manuseio das tiras-teste não forem seguidas, poderá ser obtido um resultado de teste incorreto que induza a um tratamento inadequado. Leia cuidadosamente e siga as instruções de uso, bem como as instruções dos folhetos informativos das tiras-teste e soluções de controle.

### **Por que é importante realizar regularmente testes de glicemia**

A realização regular de testes de glicemia pode fazer uma grande diferença no controle diário do seu diabetes. Nós tornamos este procedimento o mais simples possível.

## Introdução

---

### Informações importantes sobre o seu novo monitor de glicemia


- É altamente recomendável ter disponível um método de testes de retaguarda. Deixar de realizar testes pode atrasar decisões terapêuticas e ocasionar um grave problema de saúde. Um monitor de glicemia de reserva e tiras-teste de reserva são exemplos de métodos de testes de retaguarda. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico sobre outras possibilidades de métodos de retaguarda.
- O monitor de glicemia solicitará que você ajuste a hora e a data ao ser ligado pela primeira vez.
- Verifique a hora e data do monitor de glicemia antes de iniciar os testes. Ajuste a hora e data, se necessário.
- São exibidas telas com dados de amostra ao longo das instruções de uso. Os seus dados poderão ser diferentes.
- Se você seguir as etapas indicadas nestas instruções de uso, mas continuar com sintomas que não correspondam aos seus resultados de glicemia, ou caso tenha dúvidas, entre em contato com o seu médico.

### Relatar incidentes graves

Para pacientes/usuários/terceiros na União Europeia e em países com regulamentação idêntica: se, durante o uso ou em decorrência do uso deste dispositivo, ocorrer um incidente grave, queira relatá-lo ao fabricante e à autoridade competente em seu país.

# 1 O seu novo sistema

## O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me

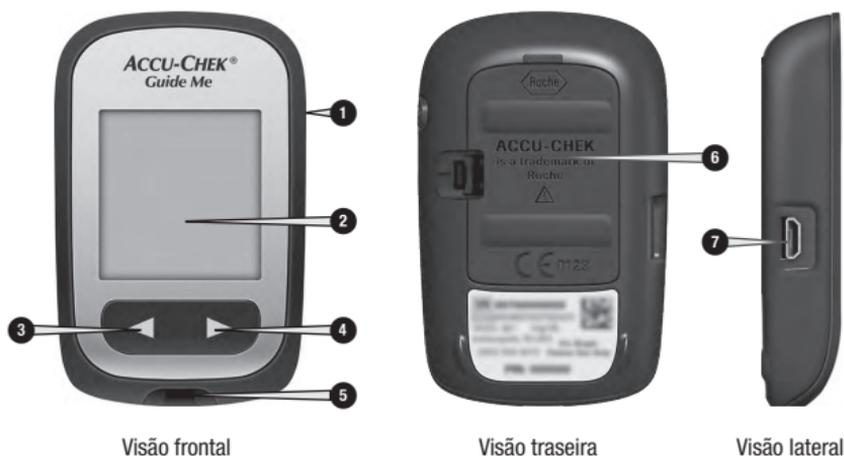

### 1. Botão liga/desliga/configuração

Liga ou desliga o monitor de glicemia e configura as opções.

### 2. Visor

Apresenta resultados, mensagens e resultados de glicemia armazenados na memória.

### 3. Botão de seta para a esquerda

Pressione para acessar a memória, ajustar configurações e percorrer resultados de glicemia.

### 4. Botão de seta para a direita

Pressione para acessar a memória, ajustar configurações e percorrer médias.

### 5. Fenda para tira-teste

Introduza a tira-teste aqui.


### 6. Tapa do compartimento das baterias

Abra para substituir as baterias.

### 7. Porta micro-USB

Transfere dados do monitor de glicemia para um computador (PC).

# 1 O seu novo sistema

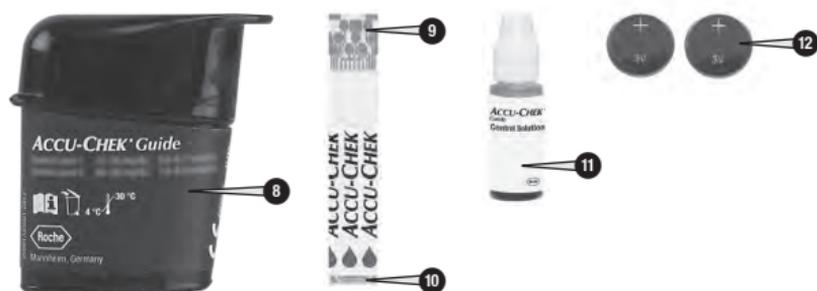

## 8. Frasco de tiras-teste\*

## 9. Tira-teste – Ponta metálica

Introduza esta ponta no monitor de glicemia.

## 10. Tira-teste – Borda amarela

Encoste aqui a gota de sangue ou de solução de controle.

## 11. Frasco da solução de controle\*

## 12. Baterias

\*Alguns itens podem não estar incluídos no kit. Esses itens são vendidos separadamente.

# 1 O seu novo sistema


## Utilização dos botões do monitor de glicemia

Ao ser instruído a pressionar um botão do monitor de glicemia, pressione o botão brevemente e solte-o.

Ao ser instruído a pressionar e manter pressionado um botão do monitor de glicemia, pressione o botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos ou mais.

## Funções dos botões

Estas são as funções do botão liga/desliga/configuração e dos botões de setas do monitor de glicemia. Estas funções constam em todas as partes destas instruções de uso.

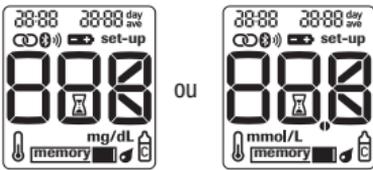Botão	Função	Ação
 [Botão liga/ desliga/ configuração]	Ligar ou desligar o monitor de glicemia. Navegar para uma opção ou fazer uma seleção.  Verificar o visor do monitor de glicemia.  	Pressione e solte.           Com o monitor de glicemia desligado, pressione e mantenha pressionado para ver o visor completo do monitor de glicemia. Se um dos segmentos estiver faltando ou diferir da ilustração, não use o monitor de glicemia. Entre em contato com o Accu-Chek Responde.
 [botões de seta para a direita e para a esquerda]	Ajustar as configurações de hora e data e percorrer os resultados de glicemia na memória.	Pressione e solte ou pressione e mantenha pressionado para percorrer mais rapidamente.

# 1 O seu novo sistema


## Símbolos

Símbolo	Descrição
	Símbolo da média de 7 dias. Indica que você está visualizando a média de 7 dias dos seus resultados de glicemia.
	Símbolo da média de 14 dias. Indica que você está visualizando a média de 14 dias dos seus resultados de glicemia.
	Símbolo da média de 30 dias. Indica que você está visualizando a média de 30 dias dos seus resultados de glicemia.
	Símbolo da média de 90 dias. Indica que você está visualizando a média de 90 dias dos seus resultados de glicemia.
	Símbolo do Bluetooth
	Símbolo do frasco de solução de controle
	Símbolo de gota
	Símbolo de ampulheta
	Símbolo de bateria fraca
	Nenhum dado a exibir
	Símbolo de emparelhamento. Um símbolo piscando indica que o monitor de glicemia está tentando emparelhar com um dispositivo. Um símbolo parado indica que o emparelhamento do monitor foi bem sucedido.
	Símbolo de aviso da temperatura
	Símbolo da tira-teste. Um símbolo piscando indica que o monitor de glicemia está pronto para que você insira uma tira-teste.
	Símbolo de rede sem fio. Um símbolo piscando indica que o monitor de glicemia está tentando conectar-se com o dispositivo emparelhado. Um símbolo parado indica que o monitor de glicemia está conectado com um dispositivo emparelhado.

# 1 O seu novo sistema

## Definição da hora e da data

1

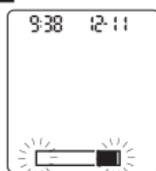


Pressione e solte para ligar o monitor de glicemia.

O símbolo da tira-teste

piscando aparecerá no visor.


2

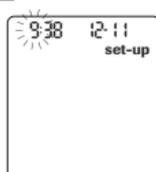

Pressione e **mantenha pressionado** até que **set-up** apareça no visor. A hora começa a piscar.

Pressione ou para diminuir ou aumentar a hora.

3

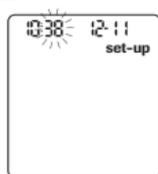

Pressione para confirmar a hora e ir para o campo seguinte.

4



Repita os passos 2 e 3 para ajustar cada campo. Pressione e **mantenha pressionado**

até que apareça o símbolo da tira-teste piscando. Introduza uma tira-teste para realizar um teste.

## NOTA

- O monitor de glicemia solicitará que você ajuste a hora e a data ao ser ligado pela primeira vez ou se ocorrer um erro.
- Para realizar um teste, pressione e mantenha pressionado , a qualquer momento, até que o símbolo piscando da tira-teste apareça.
- A hora e a data do monitor de glicemia são sincronizadas com a hora e a data do dispositivo emparelhado toda vez que o monitor de glicemia envia dados para o dispositivo emparelhado. Consulte o capítulo Comunicação sem fio, emparelhamento do monitor e transferência de dados.

## 2 Testes de glicemia

### ADVERTÊNCIA

#### Risco de sério dano à saúde

O uso de uma unidade de medida incorreta pode causar má interpretação do seu nível de glicemia e induzir a um tratamento inadequado. Os resultados de glicemia podem ser exibidos em mg/dL ou mmol/L. A etiqueta na parte de trás do monitor de glicemia mostra a unidade de medida. Se o monitor de glicemia exibir a unidade de medida incorreta, entre em contato com o Accu-Chek Responde. Caso não saiba qual é a unidade de medida correta para você, entre em contato com o seu médico.



mg/dL ou mmol/L encontra-se impresso aqui

### Utilização do sistema Accu-Chek Guide Me

### ADVERTÊNCIA

#### Risco de sério dano à saúde

- Se você derrubar o monitor de glicemia ou derrubá-lo enquanto houver uma tira-teste inserida, o monitor de glicemia e/ou a tira-teste poderão ser danificados. Descarte a tira-teste e realize um teste de controle com a solução de controle e uma tira-teste nova, ainda não utilizada, para ter certeza de que tanto o monitor de glicemia quanto as tiras-testes estão funcionando adequadamente. Em seguida, repita o teste de glicemia com uma nova tira-teste.
- Uma tira-teste armazenada ou usada de forma imprópria pode fornecer resultados de teste incorretos.
- Não armazene as tiras-teste em locais com temperatura e umidade elevadas (banheiro ou cozinha)! O calor e a umidade podem danificar as tiras-teste.
- Utilize apenas tiras-teste Accu-Chek Guide.
- Utilize a tira-teste imediatamente após retirá-la do frasco de tiras-teste.
- Não aplique sangue ou solução de controle na tira-teste antes de introduzi-la no monitor de glicemia.
- Feche bem o frasco de tiras-teste imediatamente após retirar uma tira-teste, a fim de proteger as tiras-teste da umidade do ar.

## 2 Testes de glicemia

- Armazene as tiras-teste ainda não usadas no frasco de tiras-teste original com a tampa fechada.
- Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste. Não utilize as tiras-teste após essa data.
- Armazene o frasco de tiras-teste e o monitor de glicemia em local fresco e seco, como, por exemplo, um quarto.
- Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações sobre as condições de armazenamento das tiras-teste e de funcionamento do sistema.

### Realização de um teste de glicemia com sangue da ponta do dedo

#### NOTA

- Antes de realizar o seu primeiro teste de glicemia, ajuste a hora e a data do monitor de glicemia.
- Você precisará do monitor de glicemia, de uma tira-teste e de um lancetador com uma lanceta introduzida para realizar um teste de glicemia.
- Um teste de glicemia não pode ser realizado enquanto o monitor de glicemia estiver conectado a um PC com um cabo USB.
- O monitor de glicemia desliga-se 90 segundos após um teste bem-sucedido ou 15 segundos após a retirada da tira-teste, caso não seja efetuada outra ação.

- Há 2 formas de iniciar um teste de glicemia.
- Introduza uma tira-teste no monitor de glicemia.
- Ligue o monitor de glicemia pressionando  brevemente e introduza uma tira-teste.

1



Lave as mãos com água morna e sabão. Enxágue-as e seque-as bem.  
Prepare o lancetador.

2



Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste.  
Não utilize tiras-teste vencidas.

3



Retire uma tira-teste do frasco de tiras-teste.  
Feche bem a tampa do frasco.


4



Introduza a ponta metálica da tira-teste no monitor de glicemia. O monitor de glicemia irá ligar.

## 2 Testes de glicemia

5

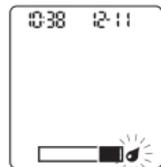

Quando o símbolo de gota piscando aparecer, faça uma punção no dedo com o lancetador.

6



Aperte suavemente o dedo para facilitar o fluxo sanguíneo. Isso ajuda a obter uma gota de sangue.

7




Encoste a **borda amarela** da tira-teste na gota de sangue. Não coloque sangue na parte de cima da tira-teste.

8



Retire o seu dedo da tira-teste quando aparecer a  piscando.

9

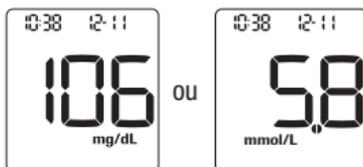

O resultado de glicemia aparecerá no visor.

Retire e descarte a tira-teste usada.

### NOTA

Ao realizar um **teste de glicemia**: se o símbolo do frasco de controle e **L1** ou **L2** piscando aparecerem no visor com o seu resultado de glicemia, algum erro ocorreu.

- Não faça nada com base nesse resultado de glicemia.
- Descarte a tira-teste e repita o teste de glicemia com uma nova tira-teste.

## 2 Testes de glicemia

---

### **Realização de um teste de glicemia com sangue da palma da mão, do antebraço ou do braço (locais alternativos para testes, LAT)**



#### **ADVERTÊNCIA**

##### **Risco de sério dano à saúde**

Seu nível de glicemia se altera mais rápido na ponta do dedo e na palma da mão do que no braço e no antebraço. Realizar um teste de glicemia com sangue do braço ou antebraço pode induzi-lo a interpretar incorretamente seu real nível de glicemia, levando a uma terapia inadequada.

- Não use locais alternativos para testes para a calibração de um sistema de monitorização contínua da glicose.
- Não use locais alternativos para testes para cálculos de dosagem de insulina.
- Os testes em locais alternativos para testes só devem feitos durante períodos de estado estável (quando a glicemia não se altera rapidamente).

## 2 Testes de glicemia

---

Você tem a opção de realizar testes com sangue de outros locais do corpo além da ponta do dedo. Os locais alternativos incluem a palma da mão, o antebraço e o braço.

O sangue obtido da ponta do dedo ou da palma da mão pode ser utilizado a qualquer momento para um teste de glicemia.

Se for usado o sangue do antebraço ou do braço, existem certos momentos em que a realização do teste não é apropriada. Isso ocorre porque o nível de glicemia se altera mais rapidamente na ponta do dedo e na palma da mão do que no antebraço e no braço. Essas diferenças podem induzi-lo a interpretar mal o seu nível de glicemia, levando a um tratamento inadequado e a possíveis efeitos adversos à saúde. Leia a próxima seção antes de tentar realizar um teste no antebraço ou no braço.

Você pode realizar um teste no antebraço ou no braço	<ul style="list-style-type: none"><li>• imediatamente antes de uma refeição.</li><li>• enquanto estiver em jejum.</li></ul>
Você NÃO deve realizar um teste no antebraço ou no braço	<ul style="list-style-type: none"><li>• até 2 horas após uma refeição, quando os valores de glicemia podem subir rapidamente.</li><li>• após injetar uma insulina de ação rápida (bolus), quando os valores de glicemia podem cair rapidamente.</li><li>• após a prática de exercícios físicos.</li><li>• se você estiver doente.</li><li>• se você suspeitar que a sua glicemia está baixa (hipoglicemia).</li><li>• se às vezes você não percebe quando a sua glicemia está baixa.</li></ul>

Caso tenha interesse em locais alternativos para testes, entre antes em contato com o seu médico.

Para obter uma ponteira para LAT e instruções detalhadas sobre LAT, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

## 2 Testes de glicemia

### Resultados de glicemia incomuns

#### PRECAUÇÃO

##### Risco de sério dano à saúde

Se seus resultados de glicemia não corresponderem ao que você sente, verifique a seguinte lista para ajudá-lo a resolver o problema.

Verificação de possíveis fontes de erro	Ação
Você lavou as suas mãos?	Lave as mãos com água morna e sabão e seque bem. Repita o teste de glicemia com uma nova tira-teste.
As tiras-teste estavam vencidas?	Descarte as tiras-teste que tiverem ultrapassado a data de validade. Repita o teste de glicemia com uma tira-teste que não esteja vencida.
A tampa do frasco de tiras-teste estava sempre bem fechada?	Substitua as tiras-teste caso suspeite que o frasco de tiras-teste tenha ficado destampado por algum tempo. Repita o teste de glicemia.
A tira-teste foi utilizada imediatamente após ter sido retirada do frasco de tiras-teste?	Repita o teste de glicemia com uma nova tira-teste.
As tiras-teste estavam armazenadas em um local fresco e seco?	Repita o teste de glicemia com uma tira-teste que foi armazenada corretamente.
Você seguiu as orientações?	Leia o capítulo Testes de glicemia e repita o teste de glicemia. Se os problemas persistirem, entre em contato com o Accu-Chek Responde.
O monitor de glicemia e as tiras-teste estão funcionando devidamente?	Realize um teste de controle. Consulte o capítulo Testes de controle para obter instruções.
Suas dúvidas ainda persistem?	Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

## 2 Testes de glicemia

### Sintomas de glicemia baixa ou alta



#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de hipoglicemia

Conhecer os sintomas de glicemia baixa ou alta pode ajudá-lo a compreender os seus resultados de teste e a decidir o que fazer se eles parecerem incomuns.

- Se você estiver apresentando qualquer um desses sintomas ou outros sintomas incomuns, realize um teste de glicemia com sangue da ponta do dedo ou da palma da mão.
- Se o resultado da sua glicemia exibido no visor for LO (baixo) ou HI (alto), entre imediatamente em contato com o seu médico.

Glicemia baixa (hipoglicemia): os sintomas de hipoglicemia podem ser, entre outros, ansiedade, tremores, suor excessivo, dor de cabeça, aumento do apetite, tontura, palidez, alteração súbita de humor ou irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, má coordenação motora, palpitações e/ou confusão mental.

Glicemia alta (hiperglicemia): os sintomas de hiperglicemia podem ser, entre outros, aumento da sede, micção frequente, visão embaçada, sonolência e/ou perda de peso inexplicada.

### Efeitos e prevalência da doença

Para informações sobre os efeitos e a prevalência da diabetes na sua região, visite o site da Federação Internacional de Diabetes, em [www.idf.org](http://www.idf.org), ou envie um e-mail para [info@idf.org](mailto:info@idf.org). Para mais informações ou aconselhamento por telefone, procure a organização nacional de diabetes do seu país.

### 3 Testes de controle

#### Quando realizar um teste de controle

Os testes de controle informam se o monitor de glicemia e as tiras-teste estão funcionando devidamente. É recomendável realizar um teste de controle quando:

- abrir uma nova embalagem de tiras-teste.
- tiver deixado aberto o frasco de tiras-teste.
- suspeitar que as tiras-teste estão danificadas.
- desejar verificar o monitor de glicemia e as tiras-teste.
- as tiras-teste tiverem sido armazenadas sob temperaturas extremas, umidade elevada ou ambas.
- o monitor de glicemia tiver sofrido uma queda.
- o resultado de glicemia não corresponder ao que você sente.
- você quiser verificar se os testes estão sendo realizados corretamente.

#### Sobre as soluções de controle

- Utilize apenas soluções de controle Accu-Chek Guide.
- Feche bem o frasco da solução de controle após a utilização.

- Ao abrir um novo frasco da solução de controle, escreva a data de abertura no rótulo do frasco. A solução de controle deve ser descartada 3 meses após a abertura do frasco da solução de controle (data de descarte) ou na data de validade indicada na etiqueta do frasco, o que ocorrer primeiro.
- Não utilize uma solução de controle que tenha ultrapassado a data de validade ou a data de descarte.
- Consulte o folheto informativo que acompanha a solução de controle para informações sobre as condições de armazenamento da solução de controle.
- O monitor de glicemia reconhece automaticamente a diferença entre a solução de controle e o sangue.
- Os resultados de controle não são exibidos na memória.
- A solução de controle pode manchar a roupa. Remova manchas lavando a roupa com água e sabão.

#### Realização de um teste de controle

Você precisa do monitor de glicemia, de uma tira-teste e da solução de controle de nível 1 (Control 1) ou nível 2 (Control 2).

**1**



Verifique a data de validade indicada no frasco de tiras-teste. Não utilize tiras-teste vencidas.

## 3 Testes de controle

2




Retire uma tira-teste do frasco de tiras-teste.  
Feche bem a tampa do frasco.

3



Introduza a ponta metálica da tira-teste no monitor de glicemia. Coloque o monitor de glicemia sobre uma superfície plana.

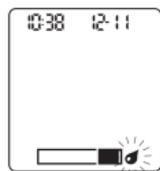

O monitor de glicemia irá ligar. Aparecerá um símbolo de gota piscando.

4



Selecione a solução de controle a ser testada. Você indicará o nível em uma etapa mais avançada do teste.

5



Retire a tampa do frasco. Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel. Aperte o frasco até que se forme uma pequena gota na ponta.

6



Encoste a gota na **borda amarela** da tira-teste. Não coloque a solução de controle na parte de cima da tira-teste.

7



Uma  piscando aparecerá no visor quando houver solução de controle suficiente na tira-teste.


8



OU



OU

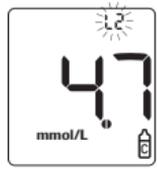

O resultado de controle, o símbolo do frasco e **L1** ou **L2** piscando aparecerão no visor. Pressione  para confirmar o nível de controle que você testou.

Pressione  ou  para alternar entre **L1** e **L2**.


### 3 Testes de controle

#### NOTA

Ao realizar um **teste de controle**: se o símbolo do frasco de controle e L1 ou L2 piscando NÃO aparecerem no visor com o seu resultado de controle, algum erro ocorreu.

- Não faça nada com base nesse resultado de controle.
- Descarte a tira-teste e repita o teste de controle com uma nova tira-teste.

9

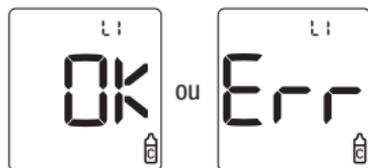

**OK** aparecerá se o resultado de controle estiver dentro da faixa aceitável.

**Err** aparecerá se o resultado de controle estiver fora da faixa aceitável.

10



Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel. Feche bem o frasco.

Retire e descarte a tira-teste usada.

#### NOTA

O monitor de glicemia desliga-se 90 segundos após um teste bem-sucedido ou 15 segundos após a retirada da tira-teste, caso não seja efetuada outra ação.

### 3 Testes de controle

#### Interpretação de resultados de controle fora da faixa aceitável

##### ADVERTÊNCIA

##### Risco de sério dano à saúde

Falsos resultados de teste podem induzir a um tratamento inadequado.

As faixas de concentração das soluções de controle estão impressas no rótulo do frasco de tiras-teste. Se o resultado de controle estiver fora da faixa aceitável, verifique se o monitor de glicemia e as tiras-teste estão funcionando corretamente. Verifique a seguinte lista para ajudá-lo a resolver o problema.

<b>Verificação de possíveis fontes de erro</b>	<b>Ação</b>
As tiras-teste ou as soluções de controle estavam vencidas?	Descarte as tiras-teste ou a solução de controle que tiverem ultrapassado a data de validade. Se a solução de controle foi aberta há mais de 3 meses, descarte-a. Repita o teste de controle com uma tira-teste e uma solução de controle que não estejam vencidas.
Você limpou a ponta do frasco da solução de controle antes do uso?	Limpe a ponta do frasco com uma toalha de papel. Repita o teste de controle com uma nova tira-teste e uma nova gota da solução de controle.
As tampas do frasco de tiras-teste e do frasco da solução de controle estavam sempre bem fechadas?	Substitua as tiras-teste ou a solução de controle caso suspeite que tenham ficado destampadas por algum tempo. Repita o teste de controle.
A tira-teste foi utilizada imediatamente após ter sido retirada do frasco de tiras-teste?	Repita o teste de controle com uma nova tira-teste e uma nova gota da solução de controle.
As tiras-teste e as soluções de controle estavam armazenadas em um local fresco e seco?	Repita o teste de controle com uma tira-teste e uma solução de controle que foram armazenadas corretamente.
Você seguiu as orientações?	Leia o capítulo Testes de controle e repita o teste de controle.
Você selecionou o nível correto da solução de controle, ou seja, nível 1 ou 2, ao realizar o teste de controle?	Se você selecionou o nível errado da solução de controle, ainda é possível comparar o resultado de controle com a faixa impressa no frasco de tiras-teste.
Suas dúvidas ainda persistem?	Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

## 4 Revisão dos seus dados

### Visão geral

- O monitor de glicemia armazena automaticamente até 720 resultados de glicemia na memória com a hora e data do teste.
- Quando houver 720 resultados de glicemia na memória, adicionar um novo resultado de glicemia excluirá o resultado de glicemia mais antigo.
- Se mais de 720 testes de glicemia forem realizados num período de 90 dias, somente os 720 resultados de glicemia mais recentes serão incluídos na média de 90 dias.
- O monitor de glicemia armazena, pelo menos, 30 resultados de controle automaticamente na memória, mas apenas o resultado de controle atual pode ser visualizado no monitor de glicemia. Para visualizar os resultados de controle armazenados, transfira-os para um software compatível.
- Quando houver 30 resultados de controle na memória, adicionar um novo resultado de controle excluirá o resultado de controle mais antigo.
- Os resultados de controle não são incluídos nas médias de 7, 14, 30 ou 90 dias.

### ADVERTÊNCIA

#### Risco de sério dano à saúde

Usar um único resultado de glicemia armazenado na memória para alterar seu tratamento pode induzir a decisões terapêuticas inadequadas. Não mude o seu tratamento com base em um único resultado de glicemia armazenado na memória. Entre em contato com o seu médico antes de mudar o seu tratamento com base em resultados de glicemia armazenados na memória.


### NOTA

O monitor de glicemia é capaz de realizar a sincronização automática da hora e da data quando está emparelhado com um dispositivo móvel que atualiza a hora e a data do monitor automaticamente. Mesmo que você utilize seu monitor de glicemia em diferentes fusos horários, os resultados são armazenados dos mais recentes para os mais antigos, e não segundo a hora e a data.

## 4 Revisão dos seus dados


### Revisão dos resultados de glicemia na memória

**1**

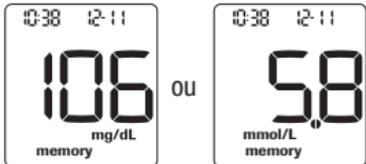

Com o monitor de glicemia desligado, pressione ◀ ou ▶ para visualizar resultados de glicemia armazenados na memória. O resultado de glicemia mais recentemente armazenado aparecerá no visor.

**2**

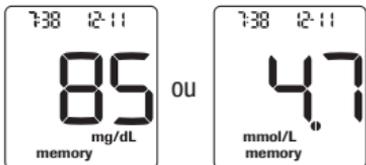


Pressione ◀ para visualizar os resultados de glicemia anteriores a partir dos mais recentes para os mais antigos.

### NOTA

◀ percorre os resultados de glicemia do mais novo para o mais antigo. ▶ percorre os resultados de glicemia do mais antigo para o mais novo.


### Revisão das médias de 7, 14, 30 e 90 dias

**1**

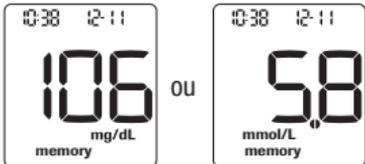

Com o monitor de glicemia desligado, pressione ◀ ou ▶ para visualizar resultados de glicemia armazenados na memória. O resultado de glicemia mais recente aparecerá no visor.


**2**

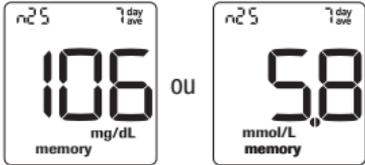

Enquanto o resultado de glicemia mais recente é exibido no visor, pressione ▶. A média de 7 dias aparecerá no visor.

## 4 Revisão dos seus dados

3

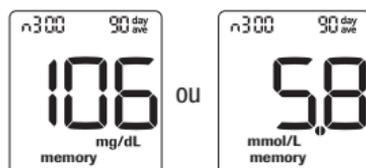

Pressione  para percorrer as médias de 7, 14, 30 e 90 dias. O número de resultados de glicemia da média = n. Pressione  para percorrer, inversamente, as médias de 90, 30, 14 e 7 dias.

Para voltar para o resultado de glicemia mais recente, pressione  na tela da média de 7 dias.

### NOTA

Se a memória contiver um resultado que seja HI ou LO ou esteja corrompido, o período de tempo e **day/ave** (dia/média) piscarão para avisá-lo que esses resultados não foram incluídos na média.

## Visão geral

O processo de criação de uma conexão entre o monitor de glicemia e o dispositivo móvel é o emparelhamento. Você precisará de um aplicativo no seu dispositivo móvel que possa aceitar os dados do monitor de glicemia. Você pode usar este aplicativo para sincronizar automaticamente e sem fio as suas informações do diabetes entre o monitor de glicemia e o dispositivo móvel.

## Emparelhamento

O monitor de glicemia só pode ser emparelhado com 1 dispositivo por vez. O emparelhamento com um segundo dispositivo sobrescreve o primeiro emparelhamento.

O monitor de glicemia e o dispositivo a emparelhar devem estar, no máximo, a 1 metro de distância entre si.

1

### No seu dispositivo móvel

Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e abra o aplicativo de gerenciamento do diabetes.

2

### No seu monitor de glicemia



Com o monitor de glicemia desligado, pressione e mantenha pressionados

◀ e ▶ simultaneamente até que ⓘ apareça. ☹ e ☺ aparecerão piscando no visor.



PIN de 6 dígitos

Localize o PIN de 6 dígitos na parte de trás do seu monitor de glicemia.

3

### No seu dispositivo móvel

No aplicativo, siga as instruções e selecione o seu monitor de glicemia. Ao ser solicitado, insira o PIN de 6 dígitos do monitor de glicemia.

O monitor de glicemia desliga automaticamente 30 s após a solicitação para inserir o PIN.

4

**No seu monitor de glicemia**

**OK** aparecerá se o emparelhamento for bem-sucedido. **Err** aparecerá se o emparelhamento falhar.

**NOTA**

O monitor de glicemia é capaz de realizar a sincronização automática da hora e da data quando está emparelhado com um dispositivo móvel que atualiza a hora e a data do monitor automaticamente. Mesmo que você utilize seu monitor de glicemia em diferentes fusos horários, os resultados são armazenados dos mais recentes para os mais antigos, e não segundo a hora e a data.


**Transferência de dados sem fio**

Se o monitor de glicemia estiver emparelhado com um dispositivo móvel e o Bluetooth estiver ligado, os seus resultados de glicemia serão automaticamente enviados para o dispositivo emparelhado.

**Desligar o Bluetooth**


Desligue o Bluetooth para desativar a comunicação sem fio (modo avião). Desligar o Bluetooth não desfaz o emparelhamento do seu monitor de glicemia.

1

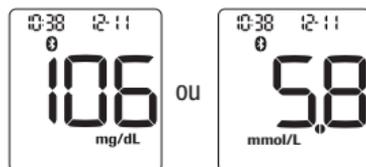

Com o monitor de glicemia desligado, pressione ◀ ou ▶. O resultado de teste mais recentemente armazenado aparecerá no visor.

2

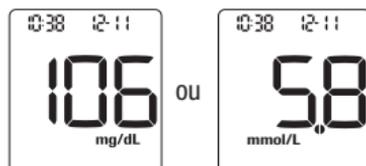

Pressione e mantenha pressionado ⓘ até que o símbolo do Bluetooth desapareça.

**Ligar o Bluetooth**


Se você desligou o Bluetooth (modo avião), siga os passos a seguir para ligá-lo novamente. Isso permitirá a comunicação sem fio com o seu dispositivo móvel.

**1**



Com o monitor de glicemia desligado, pressione ◀ ou ▶. O resultado de teste mais recentemente armazenado aparecerá no visor.

**2**

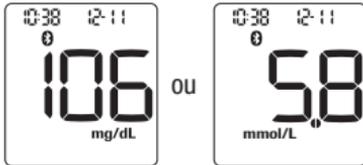

Pressione e mantenha pressionado  até que o símbolo do Bluetooth apareça.

## Transferência de dados com um cabo USB


Esta função permite que você transfira dados do seu monitor de glicemia para um software especial de gerenciamento do diabetes em um PC, utilizando um cabo USB.

**1**



Conecte a extremidade pequena do cabo USB ao monitor de glicemia.

**2**

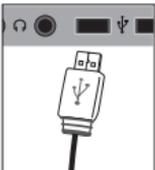

Conecte a extremidade grande do cabo USB à porta USB de um PC.  
Se o monitor de glicemia estiver desligado, ele vai ligar-se.

**3**

Inicie o software de gerenciamento do diabetes no PC e inicie a transferência de dados.

**4**



O monitor de glicemia transfere os dados para o software.

## NOTA

O cabo USB não carrega as baterias do monitor de glicemia. Retire o cabo USB depois de terminar.

### Manutenção do monitor de glicemia

Sempre que é ligado, o monitor de glicemia testa automaticamente os seus próprios sistemas e informa qualquer anormalidade ao usuário. Consulte a seção Mensagens de erro deste capítulo.

Se você derrubar o monitor de glicemia ou suspeitar que os resultados não sejam exatos, entre em contato com o Accu-Chek Responde.


#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de lesões fatais

Mantenha baterias novas e usadas fora do alcance de crianças. Para mais informações, leia a advertência na introdução destas instruções de uso.


### Substituição das baterias

1

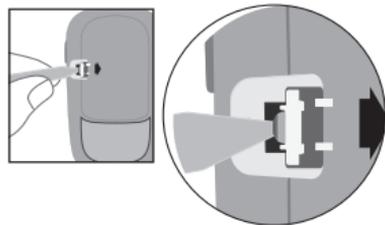


Abra a tampa do compartimento das baterias com proteção contra o acesso de crianças, inserindo um objeto fino, como uma caneta, na ranhura (ver imagem acima). Empurre a aleta na direção indicada pela seta e levante a tampa do compartimento das baterias para cima.

2

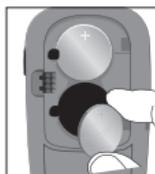

Retire as baterias usadas.

3

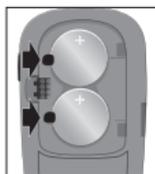

Deslize as baterias novas por baixo das aletas pretas com o **lado (+) para cima**.

Coloque novamente a tampa do compartimento das baterias e encaixe-a para fechar o compartimento. Descarte imediatamente as baterias usadas.

#### NOTA

- Tenha sempre baterias de reserva.
- A duração das baterias pode variar devido a fatores como a temperatura e o fabricante das baterias.
- Se o código de erro E-7 ou E-9 continuar aparecendo no visor depois de você trocar as baterias, retire novamente as baterias, pressione  por pelo menos 2 segundos e, então, reintroduza as baterias.
- O monitor de glicemia utiliza duas baterias de lítio de 3 volts, tipo botão CR2032. Esse tipo de bateria pode ser encontrado em várias lojas.
- Substitua sempre ambas as baterias no mesmo momento e com a mesma marca.

- Os dados do monitor de glicemia não são perdidos quando você substitui as baterias.

### Limpeza e desinfecção do monitor de glicemia

Mantenha o monitor de glicemia livre de pó. Se for necessário limpá-lo ou desinfetá-lo, siga cuidadosamente estas instruções para obter o melhor desempenho possível.

#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de infecção

Se o monitor estiver sendo operado por uma segunda pessoa que está fornecendo assistência ao usuário, o monitor deverá ser desinfetado antes de ser usado pela segunda pessoa.

#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de sério dano à saúde

- Não limpe nem desinfete o monitor de glicemia enquanto realiza um teste de glicemia ou de controle.
- Não permita a entrada de qualquer líquido nas aberturas do monitor de glicemia.
- Não borrife nada diretamente no monitor de glicemia.
- Não mergulhe o monitor de glicemia em líquidos.

### Quando limpar ou desinfetar o monitor de glicemia:

- Limpe o monitor de glicemia para remover sujidades visíveis ou outro material.

- Desinfete o monitor de glicemia a cada uso no paciente.

### O que limpar ou desinfetar:

- A área ao redor de fendas e aberturas
- O visor do monitor de glicemia
- A superfície inteira do monitor de glicemia

**1**

Certifique-se de que o monitor de glicemia esteja desligado.

Esfregue cuidadosamente a superfície do monitor de glicemia com um pano macio levemente umedecido (elimine o excesso de líquido) com uma das seguintes soluções:

#### Para limpar o monitor de glicemia

Detergente neutro para lavagem de louça, misturado com água

#### Para desinfetar o monitor de glicemia

Álcool isopropílico a 70 %

**Nota:** Durante a desinfecção, a superfície do monitor de glicemia deve ficar umedecida com álcool isopropílico durante, no mínimo, 2 minutos. Em seguida, talvez seja preciso continuar a esfregar a superfície com os panos umedecidos com álcool isopropílico.

**2**

Seque bem o monitor de glicemia com um pano macio.

### Mensagens de erro

#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de sério dano à saúde

Usar uma mensagem de erro para alterar seu tratamento pode induzir a decisões terapêuticas inadequadas.

- Nunca tome decisões terapêuticas com base em uma mensagem de erro.
- Se você tiver alguma dúvida ou caso apareça qualquer outra mensagem de erro, entre em contato com o Accu-Chek Responde.

#### NOTA

Para todas as mensagens de erro codificadas (E-1 a E 14), o código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.



O monitor de glicemia não liga ou o visor não mostra nada.

- As baterias estão esgotadas.

Introduza novas baterias.

- O visor está danificado. / O monitor de glicemia está com defeito.

Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

- Temperaturas extremas.


Leve o monitor de glicemia para um local com uma temperatura mais moderada.




O monitor de glicemia desligou automaticamente com uma conexão USB.

Retire o cabo USB e pressione o botão liga/desliga/configuração para continuar um teste ou rever resultados de glicemia.

## 6 Manutenção do monitor e solução de problemas

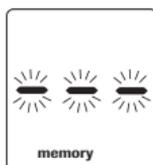

Não existem resultados de glicemia dentro da faixa para os dados selecionados.

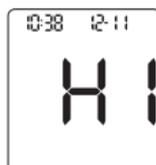


A glicemia pode estar acima da faixa de medição do sistema.

Consulte a seção Resultados de glicemia incomuns no capítulo Testes de glicemia.



O monitor de glicemia está conectado a um PC e não é possível realizar testes de glicemia nem de controle.

Remova o cabo USB e realize um teste de glicemia ou de controle OU retire a tira-teste e inicie uma transferência de dados.

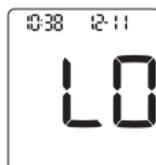

A glicemia pode estar abaixo da faixa de medição do sistema.

Consulte a seção Resultados de glicemia incomuns no capítulo Testes de glicemia.




O monitor de glicemia não conseguiu emparelhar com um dispositivo móvel.

Repita o emparelhamento.



As baterias estão quase descarregadas.


Substitua as baterias agora. Se o símbolo reaparecer depois de as baterias terem sido substituídas, retire as baterias novamente, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga/configuração por pelo menos 2 segundos e, então, reintroduza as baterias.

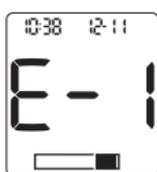

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A tira-teste pode estar danificada, inserida incorretamente, ou foi usada anteriormente.

Retire a tira-teste e introduza-a novamente ou, se danificada ou usada anteriormente, substitua-a.

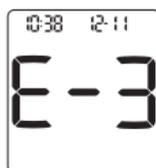

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

Ocorreu algum erro no monitor de glicemia ou na tira-teste.

Esta mensagem de erro pode aparecer se a tampa do frasco de tiras-teste não tiver sido bem fechada. As tiras-teste podem ter sido danificadas devido a um armazenamento ou manuseio inadequados.

**Nunca tome decisões terapêuticas com base em uma mensagem de erro.**

Repita o teste de glicemia. Se uma segunda mensagem de erro E-3 aparecer, realize um teste de controle utilizando a solução de controle e uma nova tira-teste. Consulte a seção Realização de um teste de controle no capítulo Testes de controle. Se você continuar a receber uma mensagem de erro E-3, use um método alternativo para testar a sua glicemia, como um monitor de glicemia e uma tira-teste de reserva. Se o resultado de glicemia obtido com o método alternativo for extremamente alto, ou se um método alternativo não estiver disponível, **entre em contato com o seu médico imediatamente.**


Em casos raros, uma mensagem de erro E-3 pode indicar que a sua glicemia está extremamente alta e acima da faixa de medição do sistema. **Consulte a seção Resultados de glicemia incomuns no capítulo Testes de glicemia para saber outras possíveis causas da mensagem de erro.**



(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A quantidade de sangue ou de solução de controle absorvida pela tira-teste foi insuficiente para a medição ou foi aplicada após o início do teste.


Descarte a tira-teste e repita o teste de glicemia ou de controle.

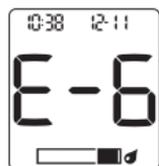

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

Aplicou-se sangue ou solução de controle na tira-teste antes de aparecer o símbolo de gota piscando no visor.


Descarte a tira-teste e repita o teste de glicemia ou de controle.

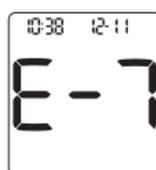

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

Um erro eletrônico ocorreu.

Retire as baterias, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga/configuração por pelo menos 2 segundos e reintroduza as baterias. Realize um teste de glicemia ou um teste de controle.

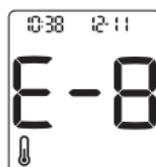

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A temperatura está acima ou abaixo da faixa apropriada para o sistema.

Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações sobre as condições de funcionamento do sistema. Vá para um local com as condições apropriadas e repita o teste de glicemia ou de controle. Não aqueça nem resfrie artificialmente o monitor de glicemia.


## 6 Manutenção do monitor e solução de problemas



(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

As baterias podem estar descarregadas.


Ligue novamente o monitor de glicemia. **Se você estiver em um ambiente frio, vá para um local com uma temperatura mais amena e teste novamente.** Se a mensagem continuar a aparecer após várias tentativas, substitua as baterias. Se a mensagem reaparecer depois de as baterias terem sido substituídas, retire as baterias, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga/configuração por pelo menos 2 segundos e, então, reintroduza as baterias.

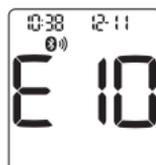

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A definição de hora e data pode estar incorreta. O símbolo de comunicação sem fio piscando aparece enquanto o monitor de glicemia tenta sincronizar a hora e a data com o dispositivo emparelhado.

Quando o símbolo de comunicação sem fio não aparecer mais, pressione o botão liga/desliga/configuração para desligar o monitor de glicemia. Pressione o botão liga/desliga/configuração uma segunda vez até que o símbolo de tira-teste piscando apareça. Se a sincronização da hora e da data não tiver sido bem sucedida, o monitor de glicemia solicitará que você ajuste a próxima vez que for ligado. Consulte a seção Definição da hora e da data no capítulo O seu novo sistema.

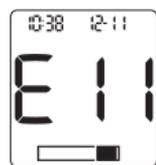

(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A tira-teste pode estar danificada. Repita o teste de glicemia ou de controle com uma nova tira-teste.

## 6 Manutenção do monitor e solução de problemas



(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

A sua amostra de sangue pode conter um alto nível de ascorbato.  
Entre em contato com o seu médico.



(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

Pode haver presença de líquido ou material estranho na fenda para tira-teste.

Retire a tira-teste e introduza-a novamente ou repita o teste de glicemia ou de controle com uma nova tira-teste. Se o erro persistir, entre em contato com o Accu-Chek Responde.



(O código de erro e **Err** irão alternar-se no visor.)

Um erro eletrônico ocorreu.  
Entre em contato com o Accu-Chek Responde.

## 7 Informações técnicas

### Limitações do produto

Consulte o folheto informativo incluído na embalagem das tiras-teste e das soluções de controle para obter as informações mais recentes sobre as especificações e limitações do produto.

Especificações	
Volume de sangue Tipo de amostra Duração do teste Faixa de medição Condições de armazenamento das tiras-teste Condições de funcionamento do sistema	Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.
Condições de armazenamento do monitor de glicemia	Temperatura: -25 a 70 °C
Capacidade da memória	720 resultados de glicemia e 30 resultados de controle com hora e data
Desligamento automático	90 segundos após a realização de um teste ou 15 segundos após a retirada de uma tira-teste.
Alimentação elétrica	Duas baterias de lítio de 3 volts (tipo botão CR2032)
Visor	LCD
Dimensões	76 × 48 × 16 mm (CLA)
Peso	Aprox. 43 g (com baterias)
Construção	Portátil
Classe de proteção	III
Tipo de monitor de glicemia	O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me é apropriado para operação contínua.
Condições de armazenamento da solução de controle	Consulte o folheto informativo que acompanha a solução de controle.
 Interfaces	USB: conector micro-B; tecnologia de baixo consumo de energia Bluetooth; Continua Certified® a um gerenciador Continua Certified.
Conectividade por radiofrequência	Tecnologia de baixo consumo de energia Bluetooth funcionando numa faixa de frequência de 2,4 GHz (de 2,402 GHz a 2,480 GHz), com uma potência máxima de transmissão de 0 dBm (1 mW).

## 7 Informações técnicas

Em atendimento às exigências da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017 - Anexo - Capítulo II - Art. 5º: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**Compatibilidade eletromagnética** – Este monitor de glicemia cumpre os requisitos de emissões eletromagnéticas de acordo com a norma europeia EN 61326-2-6. A emissão eletromagnética é, assim, mínima. Não se acredita que ocorra interferência em outros aparelhos elétricos.

**Análise do desempenho** – Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.

**Princípio do teste** – Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste.

**Declaração de conformidade** – Roche declara através da presente que o presente tipo de equipamento de rádio, o monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me, está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:  
<http://declarations.accu-chek.com>

**Protocolo de comunicação** – O monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me é Continua Certified. Continua Certified significa que este produto obedece aos padrões IEEE 11073-10417 aplicáveis e que foi testado e certificado de acordo com as Diretrizes

de design do Continua 2016, que incluem a especificação relativa à glicemia para tecnologia de baixo consumo de energia Bluetooth, *Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0* e *Bluetooth SIG, Glucose Service, Version 1.0*.

### Informações de segurança do produto

#### NOTA

- Este monitor de glicemia cumpre as normas de segurança IEC 61010-1, IEC 61010-2-101 e IEC 60950-1.
- Fortes campos eletromagnéticos podem comprometer o funcionamento do monitor de glicemia. Não utilize o monitor de glicemia próximo a fontes de radiação eletromagnética intensa.
- Para evitar descargas eletrostáticas, não utilize o monitor de glicemia em um ambiente muito seco, principalmente na presença de materiais sintéticos.

### Descarte do monitor de glicemia

#### ADVERTÊNCIA

##### **Risco de infecção**

Durante os testes de glicemia, o monitor de glicemia pode, acidentalmente, entrar em contato com sangue. Por esse motivo, os monitores de glicemia usados podem representar um risco de infecção.

Antes de descartar o monitor de glicemia, remova a bateria ou as baterias.

Descarte monitores de glicemia usados de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis. Entre em contato com as autoridades locais competentes para obter informações sobre a forma correta de descartá-los.

O monitor de glicemia está fora do âmbito da Diretiva Europeia 2012/19/UE (Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)).

Descarte as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais relativos ao meio ambiente.

Este produto possui componentes internos contendo uma substância altamente preocupante (SVHC, sigla de Substance of Very High Concern), hexabromociclododecano (CAS 25637-99-4), em uma concentração acima de 0,1 % peso por peso, assim identificada conforme o regulamento REACH da União Europeia e adicionada à lista de substâncias candidatas.

Não há exposição direta à substância e, portanto, nenhum risco quando o instrumento é operado de acordo com as instruções de uso.

## 7 Informações técnicas

### Explicação dos símbolos

Estes símbolos podem encontrar-se na embalagem, na placa de identificação e nas instruções do monitor de glicemia Accu-Chek Guide Me.

	Consulte as instruções de uso ou consulte as instruções de uso em formato eletrônico
	Atenção, consulte as indicações de segurança nas instruções de uso deste produto.
	Limites de temperatura
	Prazo de validade
	Mantenha baterias novas e usadas fora do alcance de crianças.
	3 volts tipo botão CR2032
	Riscos biológicos – Os monitores de glicemia usados podem representar um risco de infecção.
	Data de fabricação
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Dispositivo para automonitorização
	Dispositivo para teste laboratorial remoto
	Fabricante
	Identificação única do dispositivo
	Número global do item comercial
	Número de referência
	Número de série
	Número do lote
	Cumpra as disposições da legislação pertinente da UE

## 7 Informações técnicas

### Materiais adicionais

**Tiras-teste:** Tiras-teste Accu-Chek Guide

**Soluções de controle:** Soluções de controle Accu-Chek Guide

### Informações para profissionais de saúde

Este sistema pode ser usado em ambientes de atendimento médico, como consultórios médicos e enfermarias gerais, em casos suspeitos de diabetes e em casos de emergência.



#### ADVERTÊNCIA

##### Risco de infecção

Qualquer objeto que entre em contato com o sangue humano é uma possível fonte de infecção. Profissionais de saúde devem seguir os procedimentos de controle de infecções apropriados para a sua instituição. Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações adicionais para profissionais de saúde.

### Manuseio das amostras

Sempre use luvas quando manusear itens contaminados com sangue. Sempre adote procedimentos reconhecidos para o manuseio de objetos potencialmente contaminados com material humano. Siga a política de higiene e segurança do seu laboratório ou instituição. Prepare o local de coleta de sangue selecionado em conformidade com as normas do estabelecimento.

Consulte o folheto informativo que acompanha as tiras-teste para informações adicionais acerca dos tipos de amostra aceitáveis, anticoagulantes e instruções de uso.

### Recomendação de locais alternativos para testes a pacientes

As decisões sobre a recomendação de locais alternativos para testes (LAT) devem levar em consideração a motivação e o nível de conhecimento do paciente e a sua capacidade de compreender as considerações relacionadas ao diabetes e aos LAT. Ao considerar a recomendação de LAT aos pacientes, é necessário compreender que há a possibilidade de haver diferenças significativas entre os resultados de glicemia com sangue obtido na ponta do dedo ou na palma da mão e com sangue obtido no antebraço ou no braço. As diferenças na concentração do leito capilar e na perfusão sanguínea em todo o corpo podem acarretar diferenças nos resultados de glicemia, conforme o local de obtenção das amostras. Esses efeitos fisiológicos variam entre indivíduos e podem variar em um mesmo indivíduo com base no seu comportamento e estado físico relativo.

Nossos estudos sobre locais alternativos para testes em adultos com diabetes mostram que a maioria das pessoas observa que seus níveis de glicemia se alteram mais rapidamente no sangue obtido na ponta dos dedos ou na palma das mãos do que no sangue obtido no antebraço ou no

## **7** Informações técnicas

---

braço. Isso é especialmente importante quando os níveis de glicemia estão diminuindo ou aumentando rapidamente. Se o seu paciente está habituado a tomar decisões terapêuticas com base em resultados de testes na ponta dos dedos ou na palma das mãos, ele deve levar em consideração o atraso, ou lapso de tempo, que afeta os resultados de testes com sangue obtido no antebraço ou no braço.

## **8** Garantia

---

### **Garantia**

Deverão prevalecer as disposições legislativas obrigatórias que regem a venda de bens de consumo no país de compra.

## Índice remissivo

---

### B

baterias, substituição 27  
botões, funções 5, 7

### C

comunicação sem fio  
  desligar (modo avião) 25  
  emparelhamento 24  
  sincronização automática, hora e data 21, 25

### D

data de validade 11

### E

emparelhamento 24  
especificações do produto 35

### G

garantia 41  
glicemia, advertência 16, 30  
glicemia alta 16  
glicemia baixa 16

### H

hiperglicemia 16  
hipoglicemia 16  
hora e data, definição 9

### I

informações de segurança do produto 36  
informações técnicas 35

### L

limitações do produto 35  
limpeza e desinfecção do monitor de glicemia 28  
locais alternativos para testes 13, 39

### M

manutenção do monitor de glicemia 27  
materiais 39  
médias, revisão 22  
memória 22  
mensagens de erro 30

### R

resultados de controle fora da faixa aceitável 20  
resultados de glicemia incomuns 15

### S

símbolos  
  IVD 38  
  visor do monitor de glicemia 8  
solução de controle 17

### T

teste de controle, realização 17  
teste de glicemia, realização 11  
tipo de bateria 27, 35  
tiras-teste 10  
transferência de dados  
  sem fio 25  
  USB 26

### U

USB 26

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2021-11

**Importado e Distribuído por:**

Roche Diabetes Care Brasil Ltda.  
Central de Relacionamento: 0800 77 20 126  
www.accu-check.com.br

Uso em diagnóstico in vitro

Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de realizar o teste



09102-19-10742

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

 Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-check.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE e ACCU-CHEK GUIDE ME são marcas da Roche.



CONTINUA, os logótipos CONTINUA e CONTINUA CERTIFIED são marcas, marcas de serviço ou marcas de certificação da Continua Health Alliance. CONTINUA é uma marca registrada em alguns, mas não em todos os países nos quais este produto é distribuído.

A marca nominativa e os logótipos *Bluetooth*<sup>®</sup> são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e a sua utilização pela Roche está licenciada.

Todos os outros nomes de produtos e marcas são propriedade dos respectivos detentores.

© 2022 Roche Diabetes Care  
09012869061B-0322

